

Bailey's Exotic Silkies DNA LAB

INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

Gracias por elegir Bailey's Exotic Silkies DNA LAB. La recolección adecuada de las muestras ayuda a garantizar resultados de ADN precisos y a evitar retrasos.

Materiales: Cortaúñas • Toallitas con alcohol • Guantes • Tarjeta para muestras de sangre, filtro de café o tubo de PCR • Bolsas etiquetadas • Marcador • Polvo hemostático o maicena

ANTES DE COMENZAR

- Trabaje en un área limpia.
- Limpie el cortaúñas entre cada ave y deje que el alcohol se seque completamente.
- Etiquete cada muestra antes de recolectarla.
- Mantenga separada la muestra de cada ave.

MUESTRA DE SANGRE (RECOMENDADA)

1. Corte solamente la punta de una uña del ave.
2. Recolecte 1-2 gotas pequeñas de sangre en una tarjeta para muestras de sangre, filtro de café o tubo de PCR.
3. No coloque demasiada sangre. El exceso de sangre puede interferir con la prueba de PCR.
4. Deje que las tarjetas de sangre o filtros de café se sequen completamente.
5. Aplique polvo hemostático o maicena.

Muestra de plumas - Recolecte de 4 a 6 plumas recién arrancadas del pecho o cuerpo, con el cálamo (base de la pluma) intacto. No utilice plumas caídas naturalmente ni plumón de pollito. Deje que las plumas se sequen antes de empacarlas.

Membrana del huevo - Retire la membrana interna de un cascarón recién eclosionado, déjela secar completamente al aire y luego colóquela en su propia bolsa etiquetada.

Empaque - Empaque la muestra de cada ave por separado, utilizando una bolsa etiquetada por ave. Asegúrese de que todas las muestras estén completamente secas antes de cerrar las bolsas.

Enviar a:

Melana Bailey
3087 Palomino Way
Hollister, CA 95023

¿Preguntas? Llame o envíe un mensaje de texto al (669) 253-8270